

# TEST BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS (SW40006)

## RECOMMANDATIONS POUR LA RÉALISATION DES TESTS HORS DES MURS : SOUS TENTE, BARNUM OU LOCAL AÉRÉ

La réalisation et la lecture du test doivent être réalisées dans un espace garantissant une température ambiante comprise **entre 15°C et 30°C** comme il est indiqué dans la notice d'utilisation. Une utilisation hors des murs nécessite donc au préalable un chauffage des espaces.

Les coffrets peuvent être stockés dans un espace dont la température est supérieure ou égale à 4°C. Il faudra ainsi les **laisser revenir à température ambiante** (15-30°C) avant de réaliser le test.

### Note :

- suivre les instructions de la notice d'utilisation,
- la réalisation du test sous tente ou barnum nécessite des conditions climatiques clémentes (absence de pluie et de vent) et des conditions d'éclairage correctes. En effet, une humidité excessive peut impacter le résultat,
- la réalisation du test avec des composants dont la température est inférieure à 15°C, peut entraîner des résultats faussement positifs ou faussement négatifs,
- il est possible de réaliser uniquement le prélèvement à une température < 15°C. Dans ce cas, directement après le prélèvement, déposer l'écouvillon dans un tube propre. Transférer ce tube immédiatement dans un espace dont la température est comprise entre 15°C et 30°C. Le test peut alors être réalisé immédiatement, il peut sinon être conservé 1 heure jusqu'à réalisation du test. Suivre la procédure décrite dans la notice pour l'extraction des antigènes et la réalisation du test.

**Retrouvez toutes les réponses à vos questions dans la rubrique formation de notre site internet : <https://www.biosynex.com/e-learning-covid-19-ag/> ou par téléphone au 03 88 77 57 27.**

The logo for BIOSYNEX features the word "BIOSYNEX" in a bold, sans-serif font. The "IO" is in orange, while "SYNEX" is in dark grey. A small orange triangle is positioned above the "Y".

REC\_SW40006\_V02202101R02