


BIOSYNEX COVID-19 BSS

Procédure simplifiée et interprétation du résultat du test



1 Désinfecter le doigt à piquer et bien essuyer les traces d'alcool.

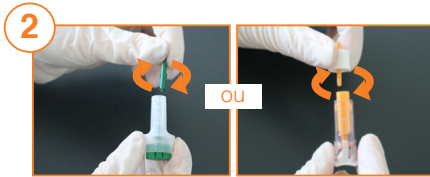


2 Tourner la tige protectrice et la tirer pour l'enlever.




ou
3 Tourner l'embout blanc et le tirer pour l'enlever.



3 Appliquer l'autopiqueur contre le doigt et appuyer fermement.

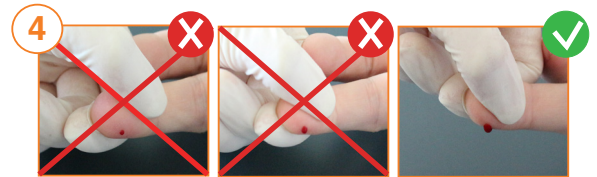


4 Former une **grosse** goutte de sang suspendue
NB : pour la mesure de la glycémie, la taille de la goutte de sang nécessaire varie de 0.3 à 1 μ L ; dans ce cas, la taille de la goutte de sang requise est de minimum 10 μ L.

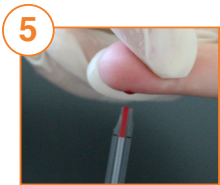

5 Remplir la pipette de sang jusqu'au trait noir **sans appuyer sur la poire**. La pipette se remplit automatiquement par capillarité.



6 Déposer la goutte de sang dans le **puits carré S**.

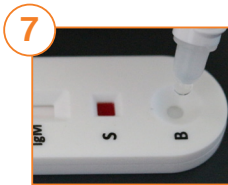


7 Ajouter 2 gouttes de tampon dans le **puits rond B**.




8 Lire le résultat à **10 minutes**.
Ne pas interpréter le test après 20 minutes !

NÉGATIF

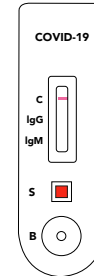


POSITIF

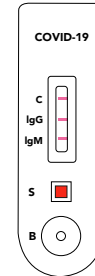

Positif
IgG et IgM



Positif
IgM

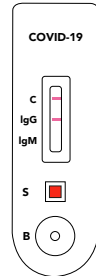

Positif
IgG

 Lire intégralement les instructions figurant sur l'étiquetage et la notice

 BIOSYNEX SWISS SA Rue de Romont 29-31 CH-1700 FRIBOURG - SUISSE • client.pro@biosynex.com • www.biosynex.com

POS_UTI_SW40005A_FR_V03202006R02

BIOSYNEX